



Załącznik nr 37

Instrukcja pobierania – Kontrola mikrobiologiczna skuteczności sterylizacji z użyciem testu Sporal S

Rodzaj pobieranego materiału:

Sporal S - biologiczny wskaźnik kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem. Ma postać krążka bibuły nasyczonego zawiesiną niepatogennych, standardowych, wysokoopornych przetrwalników szczepu *Bacillus subtilis* w ilości od 10^8 do 10^9 zarodników zdolnych do przejścia w formy wegetatywne, umieszczonego w papierowej torebce. Sporal S ulega wyjąłowieniu gdy czas sterylizacji wynosi co najmniej 70 minut, a temperatura suchego powietrza nie mniej niż 160°C , zakładając prawidłowy przebieg sterylizacji.

Potrzebne akcesoria:

- wskaźnik Sporal S w papierowej torebce w opakowaniu foliowym
- długopis, pisak

Instrukcja pobierania:

- wyjąć testy z foliowego opakowania
- umieścić testy w najtrudniej dostępnym/ych miejscu/ach załadunku sterylizatora i na papierowym opakowaniu z testem zaznaczyć miejsce umieszczenia
- przeprowadzić ustalony program sterylizacji z zachowaniem parametrów technicznych procesu sterylizacji po zakończeniu procesu sterylizacji wyjąć testy biologiczne
- dostarczyć do laboratorium
- *dodatkowo dostarczyć jeden nie sterylizowany wskaźnik biologiczny z tej samej serii co wskaźniki sterylne (kontrola dodatnia).*
- po sterylizacji wyjąć papierowe torebki z testami ze sterylizatora, umieścić je w opakowaniu zabezpieczającym transport /np. zaklejona koperta/
- do pobranych próbek dołączyć listę zbiorczą z informacjami dotyczącymi m/i: miejsca umieszczenia testów, nazwą jednostki kierującej, datą pobrania, parametrami procesu sterylizacji, nazwą sterylizatora i nazwiskiem/ami osoby/ób przeprowadzających kontrolę

Warunki i czas transportu: do 24h, najlepiej w temp. lodówki $4-8^{\circ}\text{C}$

