



Załącznik nr 39

Instrukcja pobierania- Kontrola mikrobiologiczna skuteczności sterylizacji testami ampulkowymi

Rodzaj pobieranego materiału:

Do badania kontrolującego skuteczność procesu sterylizacji stosuje się wskaźniki ampulkowe np.: 3M TM ATTEST™, STEAM. Przeznaczone są do kontroli procesów sterylizacji w nasyconej parze wodnej oraz sterylizacji tlenkiem etylenu.

Potrzebne akcesoria:

- wskaźnik/ki ampulkowy
- pisak, długopis

Instrukcja pobierania:

- wskaźniki włożyć do środka reprezentatywnych pakietów i umieścić je w miejscu o najtrudniejszym dostępie pary, przed umieszczeniem w pakiecie można umieścić każdy test w osobnym foliowo-papierowym opakowaniu, opakowanie opisać
- przeprowadzić proces sterylizacji
- po zakończeniu cyklu należy wyjąć wskaźniki ze środka pakietów
- wskaźników nie należy ścisnąć aby nie uszkodzić szklanej ampułki z pożywką wewnątrz fiolki dostarczyć do laboratorium
- dodatkowo dostarczyć jeden nie sterylizowany wskaźnik biologiczny z tej samej serii co wskaźniki sterylne (kontrola dodatnia)
- do pobranych próbek dołączyć listę zbiorczą z informacjami dotyczącymi m/i: miejsca umieszczenia testów, nazwą jednostki kierującej, datą pobrania, parametrami procesu sterylizacji, nazwą sterylizatora i nazwiskiem/ami osoby/ób przeprowadzających kontrolę

Warunki i czas transportu: do 24h w temp. pokojowej 20-25°C

Uwaga.

Wskaźniki ampulkowe (przed i po sterylizacji) należy przechowywać i transportować w warunkach temperatury pokojowej z dala od środków dezynfekcyjnych i innych chemikaliów. Wskaźniki biologiczne transportować w oddzielnych, zaklejonych i opisanych kopertach

